


Светодиодная стоматологическая лампа

Модель: ML-L 112A/L 104

Инструкция по эксплуатации

Описание конструкции и компонентов устройства:

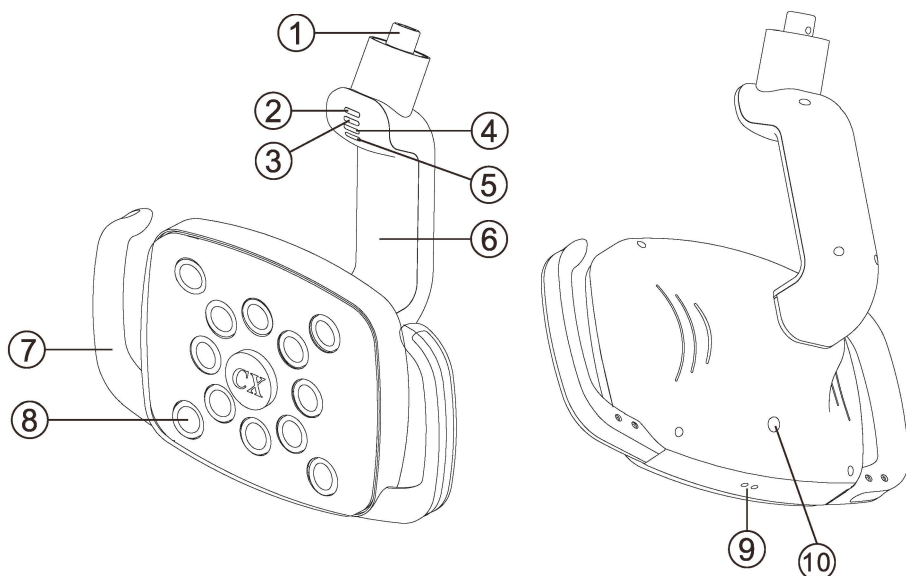

1. - Поворотный вал 2. - Индикатор включения (синий) 3. - Индикатор естественного света (теплый белый) 4. - Желтый свет (желтый) 5. - Белый свет (белый) 6. - Кронштейн 7. - Ручка 8. - Линза 9. - Окно датчика 10. - Кнопка управления

Требования к окружающей среде:

При хранения и транспортировки:

Температура: -20°C - 70°C

Относительная влажность: 10% - 90%

При работе:

Температура: 5°C - 45°C

Относительная влажность: 10% - 90%

Атмосферное давление: 500 - 1060 гПа

Технические характеристики :

Входное напряжение: 12-24 В переменного тока

Частота тока: 50/60 Гц

Потребляемая мощность: 36 Вт (12 Вт)

Степень освещенности: 7000 - 55000 ЛЮКС

(20000 ЛЮКС)

Цветовая температура: 4000-5500 К - Желтый: 4000 К

Размер светового пятна: 80x160 мм (расстояние: 700 мм)

Способ управления: индукционный переключатель, ручное управление

Способ управления :

А) Индукционное включение или выключение:

Проведите рукой на 10-80 мм ниже датчика, чтобы включить или выключить операционный свет.

В) Индукционная регулировка яркости:

При наличии светового потока удерживайте руку на расстоянии 10-80 мм от датчика. Яркость при этом плавно меняется от минимальной до максимальной. При достижении максимальной яркости раздастся характерный звуковой сигнал.

Когда уберете руку, яркость зафиксируется на текущем уровне.

С) Включение/выключение вручную и переключение режимов освещения:

В выключенном состоянии нажмите кнопку управления, чтобы включить устройство, по умолчанию будет использоваться естественный свет. Длительное нажатие переключает режимы между естественным, белым и желтым светом. Во включенном состоянии коснитесь кнопки управления, чтобы выключить устройство.

Чистка и стерилизация


Защитное стекло можно очищать с помощью чистой салфетки для линз или тканью. Корпус допускается чистить нейтральным средством, спиртом или стерильной водой. Ручки можно отсоединить для стерилизации в автоклаве.

Технические данные и инструкция по установке

1. Способ установки:

Подключите два конца электрических проводов от стоматологической лампы к соответствующим проводам на стоматологической установке. Затем поместите соединительный узел в трубу светового кронштейна и закрепите его винтом М5 через отверстие в кронштейне лампы. Убедитесь, что соединение надёжное.

2. Принципиальная электрическая схема

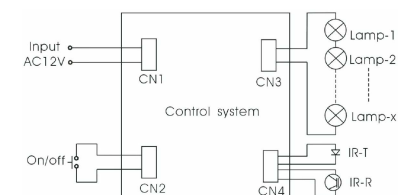

3. Комплект поставки:

Список компонентов:

1. Светодиодная лампа - 1 комплект; 2. Ручки - 2 шт.; 3. Винт М5 - 1 шт.; 4. Шестигранный ключ М5 - 1 шт.